

Vivamax kompresszoros inhalátorok tisztítása és fertőtlenítése

A kompresszoros inhalátor orvostechnikai eszköz, használata különös figyelmet igényel, tisztítása és karbantartása pedig higiéniai okokból nagyon fontos. Fordítson különös gondot a fertőtlenítésre, és a lenti utasításoknak megfelelően járjon el!

1. A készülék tisztítása

Minden kezelés után alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt, hogy eltávolítsa a gyógyszermaradványokat és az esetleges szennyeződések.

1. A kompresszor tisztításához használjon puha és száraz, karcmentes tisztítószeret tartalmazó ruhát.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék belső részei nem érintkeznek folyadékkal, és hogy a tápcsatlakozó ki van húzva.

2. A kiegészítők tisztítása és fertőtlenítése

Gondosan kövesse a tartozékok tisztítására és fertőtlenítésére vonatkozó utasításokat, mivel ezek nagyon fontosak a készülék működése és a terápia sikere szempontjából.

1. Minden kezelés előtt és után szerelje szét a gyógyszeradagolót (Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a tetejét, és távolítsa el a gyógyszer vezetőképet).
2. **TISZTÍTÁS:** Tisztítsa meg a gyógyszeradagoló alkatrészeit mosogatószerrel és vízzel. Szerelje szét a gyógyszeradagoló tartályt és a csutorát vagy a maszkot, és mossa el ezeket a részeket mosogatószeres vízben. A mosogatószer eltávolításához alaposan öblítse le ezeket.

3. **FERTŐTLENÍTÉS:** Fertőtlenítsen az alábbi lehetőségek egyikével:
Hideg módszerek:

- a) Áztassa 70%-os izopropil-alkoholban 5 percig.
- b) Áztassa 3%-os hidrogén-peroxidban 30 percig.

Meleg módszer: helyezze a gyógyszeradagolót 3 percre forró vízbe, de ne forralja!

Fertőtlenítő hatás 88 °C-tól érvényesül, így nincs szükség forrásban levő vízben áztatásra. Forrásban levő vízben a gyógyszeradagoló és tartozékai deformálódhatnak!

4. Öblítse le (hideg fertőtlenítő használata esetén) steril vízzel.
5. Elcsomagolás előtt alaposan szárítsa meg levegőn.

FIGYELEM: Amennyiben a porlasztószett eltömődött, ki kell cserélni.

FIGYELEM: A maszkot és a levegővezetékét nem szabad kifőzni.

3. Inhalátor kiegészítőinek cseréje

A kompresszoros inhalátor bizonyos részei idővel elhasználódnak, cserére szorulhatnak. Nem szükséges új készüléket vásárolnia, elegendő lehet egy új gyógyszeradagoló vagy új cső vásárlása, és a készüléke hosszú évekig hasznos segítő társa marad! Higiéniai okokból is javasolt egyes részek cseréje, például érdemes lehet a gyógyszeradagolót, a maszkot, valamint a szűrőbetéteket időnként újra cserélni. A szűrőbetétek különösen hajlamosak az elhasználódásra, ezért a készülékhez 5 pótszűrőt is mellékelünk. Normál használat esetén a levegőszűrőt körülbelül 200 üzemóra után vagy évente kell cserélni. **Javasoljuk a szűrő rendszeres ellenőrzését (10-12 kezelés után) és ha a szűrő sötét vagy barna színű vagy nedves, cserélje ki.**

Minden kompresszoros inhalátorunkhoz vásárolhat tartozékszettet (1 db levegővezeték - 2 db arcmaszk - 1 db csutora - 1 db orrszonda), gyógyszeradagolót, valamint pótszűrőbetéteket (5db/csomag).

A kiegészítőket keresse partnereink üzleteiben vagy webáruházunkban: www.vivamax.hu!